



### HU KOMPRESSZOROS INHALÁTOR LD SOROZAT. *Használati utasítás.*

#### 1. ábra ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

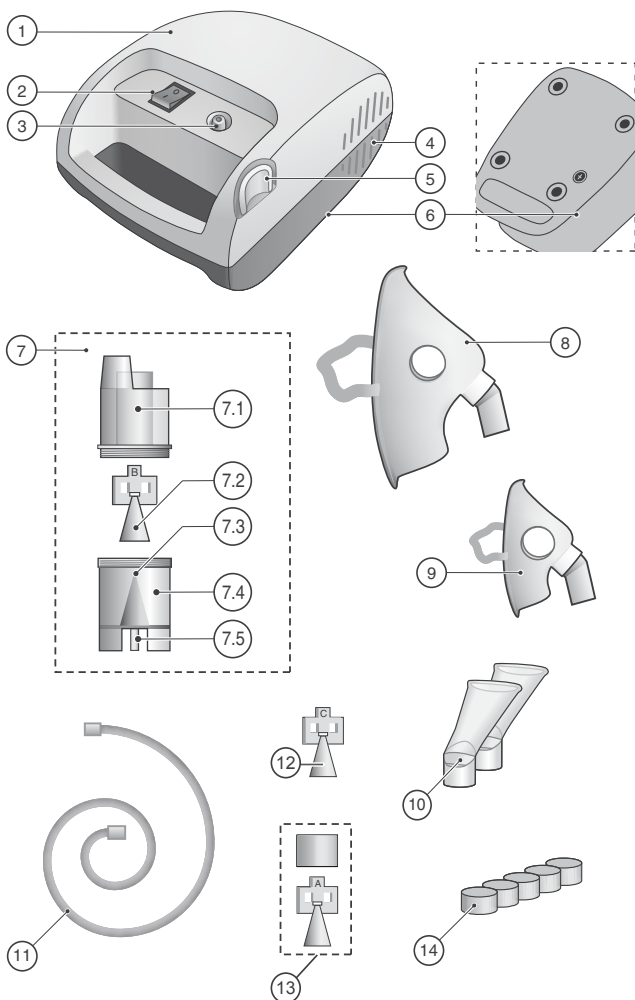


#### 2. ábra HASZNÁLAT

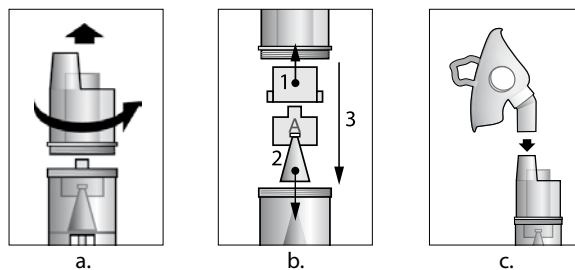


#### 3. ábra


Az adagoló típusától függően, a különböző méretű részecskék aeroszol eloszlása a következő:

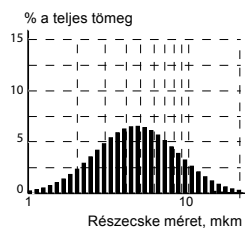


Adagoló "C" (piros)  
főleg a felsőlégutakhoz

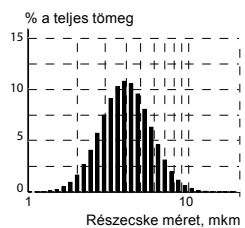

Adagoló "B" (kék)  
univerzális

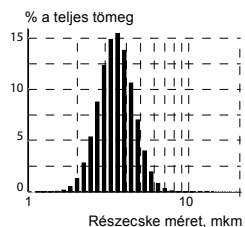


Adagoló "A" (sárga)  
főleg az alsó légutakhoz

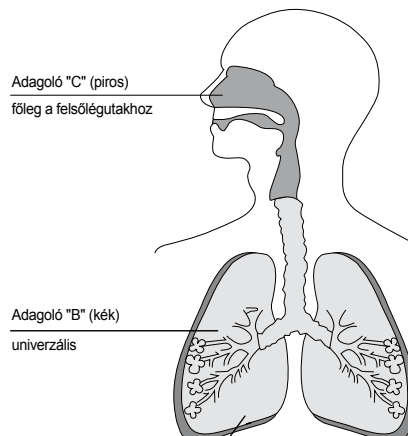

#### 4. ábra

Lélegzet-aktivált inhalátor.

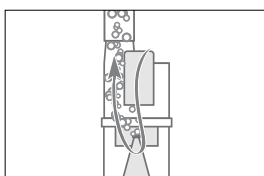

## HU

### ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (1. ábra)

- 1 KOMPRESSZOR.
- 2 ELEKTROMOS KAPCSOLÓ.
- 3 KOMPRESSZOR CSATLAKOZÓ.
- 4 BEMENETI NYÍLÁS.
- 5 SZÖGTARTÓ AZ INHALÁTORHOZ.
- 6 SZÜRŐ FOGLALAT.
- 7 INHALÁTOR LD-N105.
- 8 INHALÁTOR FELSŐ RÉSZE.
- 9 ADAGOLÓ «B» (KÉK) LD-N002.
- 10 FÜVŐKA.
- 11 INHALÁTOR ALJA.
- 12 INHALÁTOR CSATLAKOZÓ.
- 13 FELNÖTT MASZK LD-N041.
- 14 GYERMEK MASZK LD-N040.
- 15 SZÁJ CSUTORA.
- 16 INHALÁCIÓS CSŐ LD-N051.
- 17 ADAGOLÓ «C» (PIROS) LD-N003.
- 18 ADAGOLÓ «A» (SÁRGA) LD-N001.
- 19 INHALÁCIÓS SZÜRŐ.

### INHALÁCIÓS TERÁPIA - MI IS AZ?

A nebulátor egy aeroszol előállítására és porlasztására szolgáló eszköz. A "nebulátor" szó a latin "nebula"-ból ered, amelynek jelentése (köd, felhő) és először 1874-ben használták egy olyan eszközre, amely egy folyadékot orvosi céllal alakít aeroszollá. Az egyik első hordozható "aeroszol készüléket" J. Sales-Girons készítette 1859-ben. Az első inhalátorokat gőzborotvára csatlakoztatva használták és fenyőgyanták (kolofóniumok) és fertőzésgátló anyagok tuberkulózisban szenvedő betegekkel történő belelegzetésére használták. Manapság, a "nebulátor" helyett az "inhalátor" szó gyakrabban használatos. Az Inhalációs terápia célja, hogy a légutakat gyorsan terápiás adagú aeroszol állapotú készítménnyel lássa el. Az aeroszol folyamatos, több percen át tartó adagolása, nagy gyógyszer koncentrációt hoz létre az alsó és a felső légutakban és a tüdőben, és kicsi a valószínűsége annak, hogy bármilyen mellékhatást váltana ki. Illetve, hatékony hörgő tágulatót (bronchodilatáció) érünk el, és elkerülhető a kórházba utalás vagy csökkenthető a kórházi tartózkodás ideje.

A Little Doctor International (S) Pte. Ltd. az LD-221C inhalátor használatát ajánlja, mert az a gyógyszerek széles körével használható, kevés a visszamaradó inhalációs oldat mennyisége, megbízható és egyszerű a használata. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.

### ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A nagymomású LD inhalátort a légutak és a tüdő gyógyszeres aeroszol oldattal történő kezelésére tervezték klinikai és otthoni használatra.

A használati utasítás célja biztosítani a felhasználó számára kompresszoros LD inhalátor biztonságos és hatékony működését.

Az eszköz áll egy légkompresszorból és egy inhalátorból (aeroszol képző kamra) A légkompresszor, a be/ki kapcsoló és a légszűrő egyetlen tokban egyesül. A légkompresszorból, a sűrített levegő adagolása egy csövön keresztül történik az inhalátorhoz, ahol az aeroszol képződik. A kompresszor hűtését az eszköz belsejébe juttatott levegő biztosítja.

### BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK

A termék helyes használata érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági szabályokat, beleértve a jelen használati útmutatóban felsorolt figyelmeztetéseket és megjegyzéseket.

### FIGYELMEZTETÉS

- Használat előtt kérdezze meg az orvostól vagy a mentőorvostól, hogyan kell használni a gyógyszert.
- Nem szabad a bekapcsolt készüléket takaróval, türelkőzővel vagy más tárggyal letakarni. Ez a készülék túlhevülését vagy hibás működését eredményezheti.
- Nem szabad a készüléket olyan helyen használni, ahol gyúlékony gáznak vagy gőzöknek lehet kitéve.
- Nem szabad ásványvizet használni a gyógyszerporlasztóban inhalálás céljából.
- Minden használat után mindig el kell távolítani a maradék gyógyszert a gyógyszer tartályból. Az inhalálás során minden egyes alkalommal friss gyógyszert kell használni.
- Ne hagyja a készüléket és annak elemeit szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom változás hatásának, például az autóban forró hónapokban vagy közvetlen napsütésnek kitett helyeken.

### FIGYELEM

- A készüléket egyhuzamban legfeljebb 20 percig használja és várjon 40 percet a készülék újbóli használatba vétele előtt.
- Állandó felügyeletet kell tartani, ha a készüléket csecsemők, gyermekek vagy fogyatékos személyek használják, vagy a készüléket a közelükben használja.
- Semmilyen tárgyat sem szabad a készülékbe helyezni
- Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő tiszta. Ha megváltozik a levegőszűrő színe vagy azt 60 napig nem használta, cserélje ki a szűrőt.
- Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő tiszta. Ha megváltozik a levegőszűrő színe vagy azt 60 napig nem használta, cserélje ki a szűrőt.
- A készülék minden egyes használata előtt ellenőrizze a kompresszort (főegységet) és a gyógyszerporlasztó részeit. Győződjön meg róla, hogy egyik eleme sem sérült, a fűvőka és a légtömlő nincs eldugulva, a

