

DIGITÁLIS ORVOSI HŐMÉRŐ LD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LD-300, LD-301, LD-302


Little Doctor

Az LD hőmérő segítségével gyorsan, pontosan és biztonságosan mérheti az ember testének hőmérsékletét.

Ez a hőmérő kizárólag az emberi test hőmérsékletének mérésére szolgál, ami ebben a kézikönyvben meghatározott módszerekkel történik.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---|
| Hőmérséklet mérési tartomány, °C | 35.5-42.0 |
| Hőmérséklet kijelzési tartomány, °C | 32.0-42.0 |
| Mérési módszer | A maximális érték meghatározásának módja |
| A megengedhető abszolút hiba határértéke a hőmérséklet mérésénél, °C | ±0.1 |
| Érzékelő elem | Termisztor |
| Kijelző | Folyadékkristályos kijelző a frakció tizedikig terjedő jelzésével |
| Mértékegység | Celsius fok (°C) |
| Hangjelzés | A mérés végén |
| Memória | Az utolsó mérés |
| Tápfeszültség, V | 1,5 |
| Tápegység típusa | 1 akkumulátor LR41 |
| Max. szükséges teljesítmény, mW | 0,15 |
| Az akkumulátor élettartama | Körülbelül 100 óra mérés |

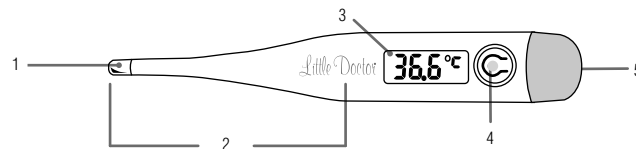


| | |
|--|--|
| Automatikus kikapcsolás | 10 perc múlva a mérés vége után |
| Teljes méretek Külméretek: Méret (tok nélkül), mm Tömeg (tok nélkül), g | 129x18x10 (LD-300, LD-301), 129x19x10 (LD-302) 10 (LD-300), 8 (LD-301), 12 (LD-302) |
| Teljeség | Hőmérő akkuval, műanyag tok, használati útmutató, csomagolás |
| Ajánlott kalibrálási intervallum | legfeljebb 2 év |
| A gyártási év | a LOT számon (az első 4 számjegy) a hőmérő hátoldalán látható |
| Működési feltételek: környezeti levegő hőmérséklet, °C relatív páratartalom, %Rh | +10 és +35 között legfeljebb 85 |
| Tárolási feltételek: környezeti levegő hőmérséklet, °C relatív páratartalom, %Rh | től -25-től +55-ig legfeljebb 85 |

ELŐVIGYÁZATOSÁGI RENDSZABÁLYOK

1. Az LD-300 hőmérő modell vízálló része a 2. ábrán látható. Kerülje a víz bejutását a készülék más részére. Az LD-301 és LD-302 típusú vízálló hőmérőtest lehetővé teszi vízben való bejutását a legfeljebb 16 cm mélységig, legfeljebb 30 percig.
2. A hőmérővel a hónalj-, orális- vagy rektális módszerrel kell mérni.
3. Kis részek ne legyenek a gyermekek számára hozzáférhetőek. Ez veszélyes az egészségükre. Csak felnőttek felügyelete mellett használjon!

MÉRÉSI SORREND, MEMÓRIA

1. Kapcsolja be a készüléket a (4) gomb megnyomásával.
2. Ha megnyomja a gombot, a (3) kijelzőn minden szegmens láthatóvá válik, ahogy látható a jobb oldali ábrán, ez azt jelenti, hogy a hőmérő működik.
3. Engedje fel a gombot. A kijelzőn megjelenik az utolsó mérés eredménye. Ezután megjelennek a "L °C" szimbólumok, és a "°C" szimbólumnak villognia kell.
4. Helyezze a hőmérő érzékelőt (1) a hónaljba (vagy más helyre, amint azt a «hőmérséklet mérési módszerek» részben jelöltük).
5. Ha a testhőmérséklet meghaladja a 32,0 °C-ot, akkor a kijelzőn a «L °C» helyett a hőmérséklet értéke megjelenik, és a «°C» jelző villogni fog a teljes mérési idő alatt.
6. Ha a hőmérséklet 16 másodpercen belül nem változik, a «°C» jelző villogni kezd, és hangjelzés hallatszik. A mérési idő a kiválasztott mérési módtól függ (lásd a «Hőmérsékletmérés módszere» c. részt). Ha a «Hőmérsékletmérés módszere» szakasz követelményeit szigorúan betartja, akkor a hangjelzés értesíti a mérés végét. Abban az esetben, ha kétség merül fel, pontosabb méréshez a mérési időt 2-3 percre kell növelni. csipogás után. Ha a mért hőmérséklet 32 °C alatt van, akkor az «L °C» folyamatosan megjelenik a képernyőn.



- Ha a mért hőmérséklet nagyobb, mint 42 °C, a «H °C» szimbólum jelenik meg.
7. A hőmérséklet értékei a kijelzőn jelen lesznek, amíg a hőmérőt nem kapcsolja ki.
 8. Kapcsolja ki a hőmérőt a (4) gomb megnyomásával.
 9. Ha a hőmérő nincs kikapcsolva, akkor kb. 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

MÓDSZEREK HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE

ORÁLIS MÉRÉS

Helyezze az érzékelőt a higiéniai tasakba (külön kell venni). A hőmérséklet mérése előtt tartsa zárva a száját 5 percig. Helyezze az érzékelőt a nyelv alá, tartsa azt a nyelvével. Zár be a száját. A hőmérséklet mérésének ideje körülbelül 1 perc.

REKTÁLIS MÉRÉS

Óvatosan helyezze be a hőmérő csúcsát a végbélbe. Ne helyezze 2,5 cm-nél mélyebbe. Így a hőmérséklet mérési ideje körülbelül 1 perc.

HÓNALJI MÉRÉS

A mérés előtt törölje le a verejtéket a hónaljban egy száraz törölközővel, és engedje le a karját kb. 5 percig. Helyezze az érzékelőt a hónaljba, szorosan nyomja meg a karját. A hőmérséklet mérése így 3-4 perc.

FIGYELEM! A rektális hőmérséklet 1 fokkal magasabb lehet, mint az orális, és hónalji 1 fokkal alacsonyabb, mint az orális. Minden kérdést ezzel kapcsolatban fel kell tenni az orvosnak.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

Ha az akkumulátor feszültsége nem elegendő a hőmérő használatához (kevesebb, mint 1,4 V), a képernyőn megjelenik egy "♻️" ikon, amely jelzi, hogy az elemet ki kell cserélni.

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt (5) úgy, hogy a fedelét az érzékelő másik oldalára húzza.
2. Távolítsa el a régi akkumulátort. Ne használjon éles fémtárgyakat.
3. Helyezzen be egy új akkumulátort, ellenőrizve a pólusok helyes helyzetét: a „plusz” felfelé, a „mínusz” lefelé nézzen.

JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK


1. Az LD berendezés jótállási idejét az árua vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.
2. A jótállási kötelezettséget garanciális kuponokkal látják el, amikor az eszközt a vevőnek adják el.
3. A jótállási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek címét a garancia kuponon találja.

Készült a Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307, levelezési cím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) ellenőrzése alatt és számára.

Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl). Service tel. : +48 12 2684748, 2684749

Részletes információ a honlapon: www.LittleDoctor.sg

 Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2006-2018
® Registered trade mark of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.